

## SVEMA SANITRUST SPRAY

Spray desinfectante rápido a base de etanol para superficies tolerantes al alcohol en áreas médicas, alimentarias, veterinarias, industriales, domésticas e institucionales.




Sanitrust Spray tiene un amplio espectro de actividad bactericida (incluidos MRSA, VRE), micobactericida, totalmente virucida (incluidos todos los virus con envoltura, Noro, Rota, Adeno, Polio), fungicida y levuricida. Sanitrust Spray está listo para usar. Aplíquelo sobre la superficie, asegurando una cobertura completa. Las superficies

superficies deben permanecer visiblemente humedecidas durante 30

segundos para que haga efecto. Uso profesional.



### INFORMACIÓN TÉCNICA

Sustancia activa	<ul style="list-style-type: none"> <li>100 g de producto contienen ingredientes activos Etanol CAS no 64-17-5 (57 g); Propano-2-ol CAS no 67-63-0 (6 g)</li> </ul>
Especificaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fragancia: sin fragancia</li> </ul>
Conservación	Puede conservarse durante 30 meses en su envase original cerrado en condiciones normales de almacenamiento. No congelar, conservar entre 5°C y 25°C.
Instrucciones de uso	<div> <div> <p>1. Pulverizar de 10 a 30 ml/ m<sup>2</sup> sobre superficie previamente limpiada</p>  <p>10-30mL/m<sup>2</sup></p> </div> <div> <p>2. Dejar actuar entre 2 min y 5 min en función del efecto deseado.</p>  <p>2min-5min</p> </div> <div> <p>3. No aclarar</p>  </div> <div> <p>4. Repita la operación de acuerdo con el protocolo de higiene vigente.</p> </div> </div>
Reglamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Biocida PT2 y PT4 Uso profesional</li> </ul>
Compatibilidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>El producto es compatible con la mayoría de las superficies lisas, excepto las sensibles al alcohol (plexiglás, etc.).</li> <li>El producto, en su uso como desinfectante de superficies en contacto con alimentos, no altera el sabor ni el olor de los alimentos, según la prueba Tetrad ASTM International E3009-15</li> </ul>
Compatibilidad cutánea	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buena compatibilidad cutánea</li> <li>Probado bajo control dermatológico</li> </ul>
Precauciones de uso	<ul style="list-style-type: none"> <li>No ingerir</li> <li>No mezclar con otros productos</li> <li>Utilice los biocidas de forma segura</li> <li>Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo</li> <li>Eliminar el contenido/envase en un contenedor de residuos autorizado No reutilizar el envase</li> <li>Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad del producto</li> <li>En caso de emergencia, póngase en contacto con el Centro de Toxicología más cercano</li> </ul>

# Technical Information Sheet

## ACTIVIDAD ANTIMIINGREDIENTESCROBIANA

Active against	Contact time
BACTERIA (INCL. MRSA, VRE):	15 sec
YEASTICIDAL ACTIVITY: CANDIDA ALBICANS	30 sec
MYCOBACTERIA: (M.AVIUM, M.TERRAE)	30 sec
VIRUSES: VACCINIA, HIV, HBV, HCV	15 sec
VIRUSES: ADENOVIRUS, NOROVIRUS	15 sec
VIRUSES: POLIO VIRUS	120 sec
<b>STANDARDS</b>	EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 17387, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 16615, EN 16777, EN 1650, EN 1276

\* Study conducted in clean conditions

PACKAGING	SKU CODE	CASE	
Product name		Pieces	
SVEMA SANITRUST SPRAY (750 ml Bottle)	5040-90-06	6	